

<div><div>SAIET</div><div>CHECK-UP WATCH</div><div>Manuale d'uso</div><div></div><div><div>SAIET®</div><div>SAIET Telecomunicazioni Srl</div><div>Via M. Serenari, 1</div><div>40013 Castel Maggiore (BO), Italia</div><div>+39 051 706711 http://www.saiet.it sales@saiet.it</div></div><div></div></div>	<div><div>Guida rapida</div><div></div><div><div>Metodo di ricarica e attivazione</div><div>La prima volta che si utilizza l'orologio, è necessario caricarlo per attivarlo. Utilizzare il cavo di ricarica magnetico in dotazione per collegarlo ai contatti di ricarica sul retro dell'orologio e collegare l'altra estremità del cavo a una porta di ricarica USB o a una porta USB del computer.</div></div></div>	<div><div>Regolazione del cinturino</div><div></div><div><div>1 Apri la fibbia magnetica del cinturino e alza la parte superiore</div><div></div><div><div>2 Fai scorrere la fibbia all'altezza stabilita con il metro di misurazione (vedi guida rosa)</div><div></div><div><div>3 Una volta posizionato sul foro corrispondente, chiudi la parte alta</div><div></div><div><div>4 Indossa il Check-up watch e chiudi la farfalla</div><div></div><div><div>5 Se troppo stretto o troppo largo, ripeti i primi 3 punti regolando a piacere</div><div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div>Installazione app e abbinamento</div><div>Scansiona il codice QR oppure scarica l'app HealthWear. Requisiti hardware: iOS 12.0 o versioni successive; Android 8.0 o versioni successive (con Bluetooth 5.1).</div><div></div><div><div>Consenti l'utilizzo della localizzazione e del Bluetooth</div><div>Registrati e configura le impostazioni personali.</div><div>Nella home clicca il disegno dell'orologio in alto a destra e seleziona Saiet Watch</div><div>Accetta le richieste di abbinamento e l'operazione è completata</div><div>Funzioni principali</div></div></div>	<div><div>Pagina funzionale principale</div><div><div>Chiamate</div><div>Quando Saiet Check-up Watch è collegato ad un dispositivo, può essere utilizzato come telefono effettuando e rispondendo alle chiamate direttamente dal polso.</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Misurazione della pressione (test completo)</div><div>Vedi foglietto allegato</div><div></div></div><div><div>Misurazione della pressione (test rapido)</div><div>Esegui un test della pressione sanguigna rapido con il metodo del test fotoelettrico. I risultati di questo test sono solo di riferimento. Per una maggiore accuratezza, effettua il test completo.</div><div></div></div></div>	<div><div>Pagina funzionale principale</div><div><div>Ossigeno nel sangue</div><div>Seleziona questa funzione per aprire la schermata dedicata al test di ossimetria. Avvia la misurazione e visualizza in tempo reale i livelli di ossigeno nel tuo sangue.</div><div></div></div><div><div>Pulsazioni</div><div>Seleziona questa funzione per accedere alla schermata della frequenza cardiaca e controllare in tempo reale i tuoi battiti.</div><div></div></div><div><div>Lipidi nel sangue</div><div>Apri l'APP dal telefono, quindi seleziona: Il mio dispositivo → Impostazioni sanitarie → Calibrazione dei lipidi. Inserisci il tuo valore di calibrazione e completa la calibrazione. L'orologio aprirà automaticamente la schermata della misurazione o monitorare i livelli in tempo reale.</div><div></div></div></div>	<div><div>Acido urico</div><div>Apri l'APP dal telefono, quindi seleziona: Le mie impostazioni di integrità → Il mio dispositivo → Calibrazione dell'acido urico. Inserisci il tuo valore di calibrazione e completa la calibrazione. L'orologio aprirà la schermata del test dell'acido urico, dove potrai avviare la misurazione o monitorare i livelli in tempo reale.</div><div></div></div> <div><div>Temperatura corporea</div><div>Accedi all'interfaccia dedicata per monitorare in tempo reale la temperatura corporea. Quando l'orologio è collegato all'APP, puoi attivare il rilevamento automatico e salvare i dati fino a 30 giorni. Nota: durante la misurazione, assicurati che l'orologio sia ben a contatto con la pelle.</div><div></div></div>
--	---	--	--	---	---	--