

ISTRUZIONI

1) Infilare:

Infila la fascia posizionandola all'altezza dello stoma, facendo attenzione che questo sia ben coperto sia sul bordo superiore che su quello inferiore e che non ci siano pieghe che possano impedire il crearsi del vuoto.

Fai attenzione a non danneggiare la fascia.

2) Rimuovere l'aria:

Inserire il tubetto all'estremità della pompetta nell'attacco della valvola. Agire sulla pompetta fino a quando non diventa piatta. Rimuovere la pompetta e richiudere il tappino di sicurezza. Dopo aver creato il vuoto, osservare il dispositivo per circa 5 minuti prima di immergersi in acqua.

Fin quando la Fascia resta sottovuoto (si notano pieghe rigide), è sigillata e completamente impermeabile.

3) Sfilare:

Per rimuovere la Fascia, semplicemente sollevare il lembo superiore ed aprire il tappino per permettere all'aria di rientrare, quindi sfilarla delicatamente. La Fascia Impermeabile può essere risciacquata con acqua dolce o lavata con acqua e sapone neutro.

Per individuare la propria taglia, misurare la circonferenza corporea in corrispondenza dello stoma.

Nota Bene:

Non indossare la Fascia Impermeabile per troppo tempo; raccomandiamo di rimuoverla ogni 45 minuti di utilizzo.

Controindicata in caso problemi vascolari.

Questo prodotto contiene lattice naturale, non usare in caso di allergia al lattice.

Indicata per persone con stomia o portatori di PEG; in ogni caso seguire il consiglio del medico curante.