

Fascia stomia per Costume



Colori

Blu



Nero



Composizione

Poliammide 80%

Elastan 20%

Taglie / Misure

XXXS	cm. 50-60	L	cm. 101-110
XXS	cm. 61-70	XL	cm. 111-120
XS	cm. 71-80	XXL	cm. 121-130
S	cm. 81-90	XXXL	cm. 131-140
M	cm. 91-100		

Istruzioni Lavaggio



Lavare a
mano

Non
candeggiare

Stirare a
bassa
temperatura

Non lavare a
secco

Non utilizzare
l'asciugatrice

Istruzioni d'uso

Vedere foglio illustrativo istruzioni inserito nella confezione.

Indicazioni

Prodotto per pazienti stomizzati

Avvertenze

Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.

Il dispositivo non è sterile.

Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.

Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.

I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Istruzioni per indossare la Fascia per Costume

- 1- La fascia può essere indossata indifferentemente passando dai piedi o dalla testa
- 2- La parte superiore è quella con il risvolto esterno, che deve essere a contatto con la pelle
- 3- Il taglio a croce tramite il quale si inserisce la sacca deve essere posto in alto
- 4- La parte inferiore è quella aperta (con il risvolto all'interno)
- 5- La sacca va inserita facendola passare tramite il foro a croce
- 6- Una volta inserita, la sacca può essere comodamente sistemata inserendo la mano sia dall'apertura inferiore, sia da quella superiore
- 7- Si consiglia di inserire la sacca nella ripiegatura interna posta nella parte inferiore