

## Cintura Reggi-sacca



### Colori

Beige



Nero



### Composizione esterna

Poliammide 80%

Elastan 20%

### Composizione interna

Poliestere 100%

### Taglie / Misure

**S** cm. 65-90

**L** cm. 116-140

**M** cm. 91-115

### Istruzioni Lavaggio



Lavare a  
mano

Non  
candeggiare

Stirare a  
bassa  
temperatura

Non lavare a  
secco

Non utilizzare  
l'asciugatrice

## Istruzioni d'uso

*Vedere foglio illustrativo istruzioni inserito nella confezione.*

## Indicazioni

*Prodotto per pazienti stomizzati*

## Avvertenze

*Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.*

*Il dispositivo non è sterile.*

*Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.*

*Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.*

*I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.*

*Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.*

## **Istruzioni per indossare la cintura reggi-sacca**

1. Aprire la cintura, posizionarla intorno all'addome e richiuderla. La parte con l'apertura della sacca va indossata a contatto con il corpo
2. Inserire delicatamente la sacca nell'apposita apertura
3. Chiudere la cintura tramite la chiusura a Velcro