

## Slip Uomo Alto – art. 556 Prodotto da Safte s.p.a.



### Colori

Bianco



### Composizione Slip

Cotone 88 %

Elastan 12 %

### Taglie / Misure

<b>2</b>	cm.	76-80	<b>5</b>	cm.	91-95
<b>3</b>	cm.	81-85	<b>6</b>	cm.	96-100
<b>4</b>	cm.	86-90	<b>8</b>	cm.	101-105

### Istruzioni Lavaggio



Lavare a mano	Non candeggiare	Stirare a bassa temperatura	Non lavare a secco	Non utilizzare l'asciugatrice
---------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------

## Istruzioni d'uso

Gli slip per stomia hanno una particolare tasca interna realizzata nel medesimo tessuto. La tasca interna è adatta per le diverse posizioni della stomia, sia a destra che a sinistra. Il corretto sostegno della sacca viene ottimizzato, evitando altresì il contatto della sacca sulla pelle e riducendo così il rumore di sfregamento. Gli slip per stomia hanno un'ottima vestibilità e comfort. Aiutano a sentirsi più sicuri, garantendo riservatezza nelle attività quotidiane.

## Indicazioni

*Prodotto per pazienti stomizzati*

## Avvertenze

*Per il corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso.*

*Il dispositivo non è sterile.*

*Non posizionare a contatto con la pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo.*

*Non modificare il dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.*

*I materiali utilizzati per il confezionamento del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali.*

*Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.*