

**Descrizione** Denthoral Compresse igienizzanti

Rev. 0 del 08/11/2023



## Anagrafica Prodotto

Codice	196
Codice Fabbricante	04 063
Descrizione	Le compresse Denthoral svolgono una rapida azione igienizzante, anche nei punti più difficili della dentiera. Grazie alla loro specifica formula attiva, già durante la prima fase dell'effervescenza, esplicano la loro forte attività che garantisce una spiccata azione detergente e anti-macchia. Nell'arco di pochi minuti la protesi risulterà igienizzata e priva di contaminazione. La protesi sarà quindi pronta nuovamente per il suo uso. Si raccomanda un uso quotidiano. L'uso delle compresse Denthoral è consigliato per protesi dentali parziali e/o totali e per apparecchi ortodontici correttivi. Il dispositivo è commercializzato confezionato in un foil in alluminio monodose, litografato al suo esterno, con le informazioni di etichettatura.

## Caratteristiche Organolettiche

Aspetto	Compressa solida
Colore	Celeste

## Dati chimico fisici

Ingredienti (INCI)	Sodio Bicarbonato, Potassio Monopersolfato, Sodio Lauril Solfato, Acido Citrico Anidro, Sodio Carbonato, PVP Copolimero, Lattosio, Aroma, Colore Blue E132.
--------------------	---

## Caratteristiche Tecniche

Classificazione	DM di classe I
RDM	1274242

**Descrizione** Denthoral Compresse igienizzanti

Rev. 0 del 08/11/2023

## Modalità d'uso

### MODO D'USO

1. Mettere una compressa Denthoral in un bicchiere di acqua tiepida. L'acqua si colorerà di azzurro, sviluppando una benefica schiuma, a conferma dell'inizio dell'attività igienizzante.
2. Immergere la protesi
3. Dopo circa 3 minuti la compressa si sarà completamente sciolta esplicando la sua azione igienizzante totale che si completerà nell'arco dei successivi 30 minuti.
4. E' possibile tenere la protesi a bagno anche tutta la notte.
5. Sciacquare la dentiera sotto l'acqua corrente e pulirla con uno spazzolino.
6. Dopo la pulizia applicare con fiducia la crema adesiva Denthoral.

### AVVERTENZE

Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Buttare via la soluzione dopo l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non usare se allergici a qualcuno degli ingredienti o ai persolfati. Non mettere la compressa in bocca. La polvere della compressa può causare danno agli occhi. Non bere la soluzione, non fare gargarismi. Sciacquare bene la dentiera prima di rimetterla in bocca. Interrompere l'uso e rivolgersi al medico se un'irritazione, un gonfiore o dolore si sviluppassero dopo il primo uso o successivamente. Consultare le istruzioni per l'uso. Tenere in luogo secco. Solo per un'applicazione.

## Confezionamento

**Imballo primario**

Astuccio contiene 30 compresse effervescenti confezionate singolarmente in FOIL

**Imballo secondario**

720 Pz (30x24)

## Distribuito da

Sanires S.r.l.

Via G. Galilei Trav III, 15/B - 25010, San Zeno Naviglio (BS)