

Descrizione Denthoral Fix Pasta adesiva per protesi

Rev. 0 del 09/11/2023



Anagrafica Prodotto

Codice	197
Codice Fabbricante	04 050TU
Descrizione	La Crema Adesiva per protesi Denthoral Fix è un prodotto in pasta che, a contatto con l'acqua presente nella saliva, presenta proprietà adesive che garantiscono l'aderenza delle protesi dentali. La funzione della crema adesiva è dunque quella di garantire la tenuta della protesi, evitando le infiltrazioni di cibo tra protesi e gengive e lo sviluppo batterico. Inoltre, l'applicazione della crema adesiva permette di prevenire i disagi della masticazione ed i dolori gengivali dovuti al movimento della protesi.

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto	Pasta
Colore	Rosa
Odore	Caratteristico

Dati chimico fisici

Ingredienti (INCI)	Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, Aroma, Menthyl Lactate, CI 45430.
---------------------------	--

Caratteristiche Tecniche

Classificazione	DM di classe I
RDM	1620216

Descrizione Denthoral Fix Pasta adesiva per protesi

Rev. 0 del 09/11/2023

Modalità d'uso

MODO D'USO

1. Igienizzate la vostra protesi con le compresse effervescenti Denthoral e poi asciugarla con cura.
2. Stendete tre piccole bande di crema Denthoral Fix sulla protesi asciutta nei punti ove la protesi viene a contatto con le gengive ed il palato, non troppo vicino ai bordi della dentiera, evitando di far fuoriuscire il prodotto dalle gengive. La quantità di crema necessaria da applicare può variare a seconda delle esigenze personali. Si consiglia di applicare inizialmente una piccola quantità per poi aumentarla le volte successive, qualora sia necessario. Per rimuovere eventuali residui di crema si consiglia di utilizzare lo spazzolino.
3. Posizionare la protesi in bocca ed effettuare una moderata pressione per alcuni secondi.
4. Attendere qualche minuto dall'applicazione prima di mangiare o bere.
5. Per rimuovere la dentiera, sciacquare la bocca con acqua calda ed oscillare delicatamente finché non si allenta.

AVVERTENZE

Prodotto per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno degli ingredienti o in presenza di affezioni della mucosa orale. Non usare dopo la data di scadenza. Con un uso adeguato, è sufficiente una sola applicazione giornaliera. Tenere pulito e asciutto il beccuccio e il tappo. Chiudere accuratamente il tappo dopo l'uso.

Confezionamento

Imballo primario Astuccio e tubo da 45 g
Imballo secondario 24 Pz (1x24)

Distribuito da

Sanires S.r.l.
Via G. Galilei Trav. III, 15/B - 25010, San Zeno Naviglio (BS)